



UA.TR.098

Апарат для зшивання при геморої стерильний одноразового використання

Інструкції з використання

Будь ласка, уважно прочитайте **Інструкції з використання** перед застосуванням



I. Принцип дії

Цей апарат для зшивання при геморої стерильний одноразового використання призначений для видалення та з'єднання за допомогою анастомозу випадіння тканин слизової оболонки навколо анального каналу та прямої кишки. Процедура усунення випадіння та лікування геморою визначає розмір пролапсу слизової тканини та фіксує край шва та розташування кисетного шва, що полегшує операції з оперативного втручання при геморої.


II. Технічні параметри та розміри

Код виробу	Кількість скоб (шт.)	Діаметр скальпеля (мм)	Маркування кольором
HYG-32	30	23	чорний
HYG-33	28	24.4	чорний
HYG-34	32	24.4	чорний


III. Технічний опис виробу

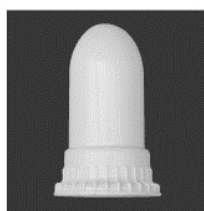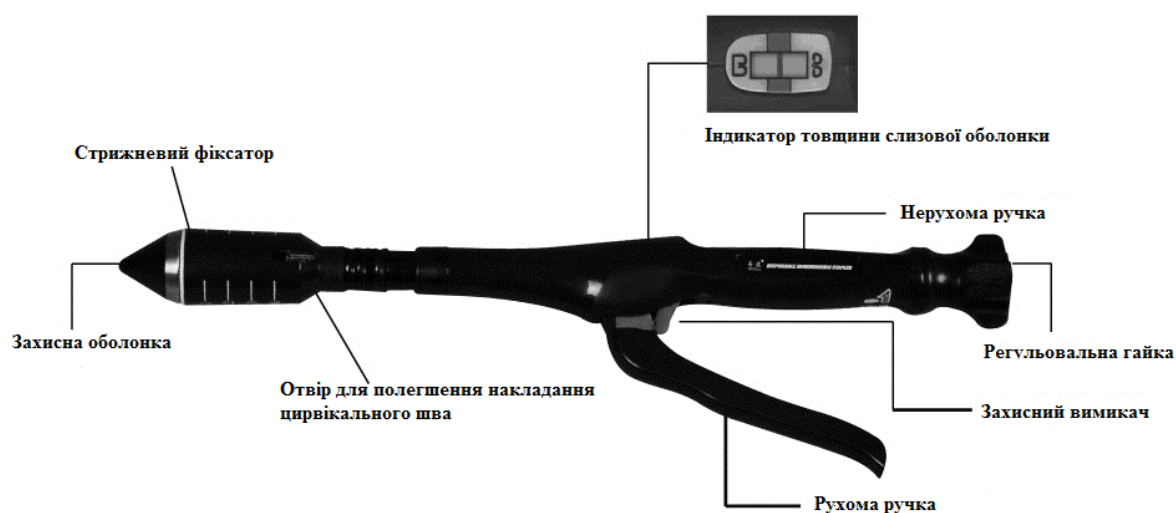


Анальний ретрактор

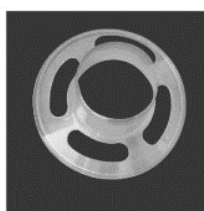

Аноскоп

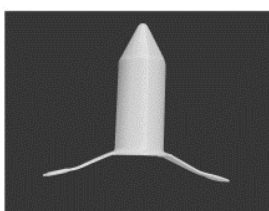

Провідник для лігатури

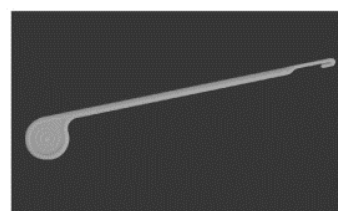

Вигнута голка

IV. Значення символів



Метод стерилізації, під час якого використовують випромінювання



Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО



Код партії



Дата виготовлення



Використати до



Засторога! Прочитайте інструкцію перед використанням



Не використовувати якщо упаковка пошкоджена



Виробник

V. Етапи використання

1. Використовуючи три скоби, щоб зафіксувати три області, де пролапс слизової оболонки товстої кишки менший, потім введіть анальний ретрактор та аноскоп в анальний отвір.
2. Анальний ретрактор та аноскоп в анальному отворі виправлять випадіння гемороїдальних вузлів або слизової оболонки прямої кишки. Витягніть анальний ретрактор, щоб помістити випадіння слизової тканини у аноскоп.
3. Вставте провідник для лігатури через аноскоп. Лігатура повинна бути на 3-4 см над прямокишково-задньопрохідною лінією, відрегульованою відповідно до показників пролапсу. Шляхом обертання провідника для лігатури, лігатуру можна затягнути навколо всього анального каналу.
4. Введіть апарат для накладання анастомозу, щоб ввести стрижневий фіксатор у верхню частину сумки, потім зав'яжіть лігатуру на вузол на центральному стрижні пристрою.
5. За допомогою викривленої голки, витягніть кінець лігатури з отвору для полегшення накладання цирвікального шву апарата для накладання анастомозу.
6. Виконайте кисетний шов, який дав би змогу вставити випавшу слизову прямої кишки у головку апарату для накладання анастомозу та закрити її. Показання червоної шкали потрапили до зеленої зони, та очікувалося, що показники досягнуть критичної межі зеленої зони. Відкрийте запобіжник, та відріжте зайву частину слизової оболонки прямої кишки.
7. Щоб швидко зупинити кровотечу, тримайте апарат для накладання анастомозу закритим протягом принаймні 30 секунд після тригерування. Вимкніть апарат для накладання анастомозу проти часової стрілки на 2-3 оберти та вийміть його з анального каналу. Операція завершена.

IV. Додаткова інформація

1. Лігатура повинна проходити на 4 см вище прямокишково-задньопрохідної лінії. А анастомозний порт повинен бути на 2 см вище, оскільки низьке розташування призведе до виникнення кровотечі після операції, тоді як вище розташування створить ефект непомітності. Найнижча позиція шва повинна бути під слизовою оболонкою прямої кишки. Якщо він занадто мілкий, легко пошкодити слизову оболонку, а якщо занадто глибокий, легко пошкодити сфінктер.
2. Виконаний шов не повинен бути занадто затягненим бо він розійдеться.
3. Після операції перевірте анастомозний порт за допомогою провідника для лігатури. Якщо виявлено кровоточу, місце кровотечі потрібно захити, щоб зупинити кровотечу.

VII. Заходи безпеки

- (1) Ретельно перевірте пакування товару перед використанням. Припиніть використання товару у випадку, якщо упаковка пошкоджена.
- (2) Цей апарат стерилізований за допомогою гама випромінювання та постачається для клінічного використання у стерильній упаковці.
- (3) Цей апарат призначений для одноразового використання, тому його не можна використовувати повторно, навіть після стерилізації.
- (4) Переконайтеся, що строк придатності апарату не закінчився (три роки після стерилізації). Суворо заборонено використовувати апарат після закінчення строку придатності.

VIII. Зберігання

Стерилізовані продукти потрібно зберігати у сухому приміщенні з достатньою вентиляцією та за відсутності їдких газів.

IX. Уповноважений представник виробника в Україні

Представник : ТОВ «Фармлінк»

Адреса : Україна, м. Київ, 04080, вул. Костянтинівська 63/12

Тел.: +38(044)224-54-86

Сайт: www.farmlink.ua

Email: farmlink@farmlink.ua