



UA.TR.098

**Лінійний апарат для зшивання стерильний одноразового використання**

# **Інструкції з використання**

Будь ласка, уважно прочитайте **Інструкції з використання** перед застосуванням

## I. Принцип дії


Лінійний апарат для зшивання стерильний одноразового використання використовується для накладання анастомозів шляхом вистрілювання у тканину двох розміщених у шаховому порядку рядів титанових скоб замість ручного зшивання. Це зменшує тривалість операційного втручання та знижує кровотечу, є легким у застосуванні та покращує якість оперативного шва.

## II. Технічні параметри та розміри

Код виробу	Кількість скоб (шт.)	Діаметр скальпеля (мм)	Кольорове маркування касети
HSN-30H	13	33	Зелений
HSN-30L	13	33	Синій
HSN-45H	19	46	Зелений
HSN-45L	19	46	Синій
HSN-60H	25	61	Зелений
HSN-60L	25	61	Синій
HSN-90H	39	95	Зелений
HSN-90L	39	95	Синій

Зверніть увагу: Зелена касета використовується для товстої тканини; синя касета – для нормальної за товщиною тканини.

## III. Технічний опис виробу

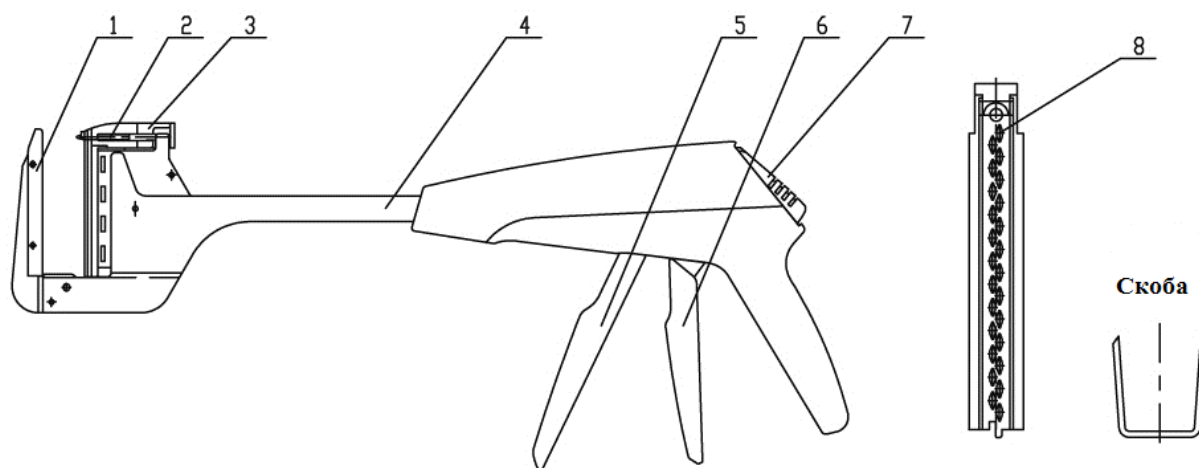

1. Накладка 2. Стрижень регулювання положення 3. Касета 4. Основна частина  
5. Спусковий механізм 6. Механізм подачі 7. Регулювальна ручка для налаштування пристрою 8. Скоба

#### IV. Значення символів



Метод стерилізації, під час якого використовують випромінювання



Повторно використовувати **ЗАБОРОНЕНО**



Код партії



Дата виготовлення



Використати до



**Засторога! Прочитайте інструкцію перед використанням**



Не використовувати якщо упаковка пошкоджена



Виробник

**V. Етапи використання (Примітка: Ця Інструкція з використання не може використовуватися в якості Інструкцій для технологічного використання апарата для проведення хірургічних операцій з накладанням анастомозів.)**

1. Вийміть апарат з внутрішньої упаковки. Зніміть захисну плівку, тримайте апарат відчиненим.
2. Перед використанням переконайтеся, що: а) касета підходить до зшивання тканини лінійним апаратом; б) лінійний апарат знаходиться у необхідній зоні.
3. Виставте механізм подачі у перше положення, Ви почуєте звуковий сигнал, в цей час стрижень регулювання положення автоматично зануриться у накладку, довжину виконаного шва можна регулювати. Її можна визначити точно.
4. Зшийте тканину у зоні зшивання, зробіть це обережно.
5. Переключіть механізм подачі у друге положення, Ви почуєте другий звуковий сигнал, він означатиме, що тканина повністю прошита.
6. Натисніть спускову кнопку, щоб закінчити накладання шву (якщо потрібно виконати обрізання, переконайтеся, що це виконано до вимкнення апарату).
7. Натисніть спусковий механізм, щоб витягти апарат.
8. Перевірте стан шва, у випадку кровотечі місце кровотечі потрібно зашити, щоб зупинити кров.

## **VI. Перезарядження касети**

1. Натисніть кнопку налаштувань пристрою та відкрийте апарат.
2. Візьміть касету та витягніть її у горизонтальному положенні з отвору для касети.
3. Візьміть нову касету таким же чином та обережно вставте її у отвір для касети. Нова касета зайняла правильне положення, якщо Ви почули чітке клацання.

## **VII. Заходи безпеки**

- (1) Ретельно перевірте пакування товару перед використанням. Припиніть використання товару у випадку, якщо упаковка пошкоджена.
- (2) Цей апарат стерилізований за допомогою гама випромінювання та постачається для клінічного використання у стерильній упаковці.
- (3) Цей товар призначений для одноразового використання, тому його не можна використовувати повторно, навіть після стерилізації.
- (4) Переконайтеся, що строк придатності товару до використання не закінчився (три роки після стерилізації). Суворо заборонено використовувати продукт після закінчення строку придатності.

## **VIII. Зберігання**

Стерилізований апарат потрібно зберігати у сухому приміщенні з достатньою вентиляцією та за відсутності їдких газів.

## **IX. Уповноважений представник виробника в Україні**

**Представник : ТОВ «Фармлінк»**

Адреса : Україна, м. Київ, 04080, вул. Костянтинівська 63/12

Тел.: +38(044)224-54-86

Сайт: [www.farmlink.ua](http://www.farmlink.ua)

Email: [farmlink@farmlink.ua](mailto:farmlink@farmlink.ua)